



ISTRUZIONE OPERATIVA

IST004**OSSIGENOTERAPIA**Rev. 00
del 01-02-16


Pag. 1 di 3

OSSIGENOTERAPIA**INDICE DELLE REVISIONI**

Numero	Data	Descrizione	Paragrafi Variati	Pagine Variate
00	01-02-16	Prima emissione	TUTTI	TUTTE

RESPONSABILITA'

	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
DATA	01-02-2016	01-02-2016	01-02-2016
FUNZIONE	Il Direttore di Struttura	Il Direttore Sanitario L'Infermiere	Presidente/Amministratore Unico
FIRMA			

	ISTRUZIONE OPERATIVA		IST004
	OSSIGENOTERAPIA		Rev. 00 del 01-02-16


La contaminazione del materiale per OSSIGENOTERAPIA (gorgogliatori, maschere, tubi,...) può rappresentare una delle più gravi fonti di insorgenza delle infezioni delle vie respiratorie. Pertanto è indispensabile garantire un corretto uso ed una altrettanto attenta e corretta manutenzione.

GORGOGLIATORI RIUTILIZZABILI:

- A) Il serbatoio deve essere riempito CON ACQUA DISTILLATA STERILE (NON acqua di rubinetto) subito PRIMA DELL'UTILIZZO;
- B) NON aggiungere acqua nel serbatoio prima di aver completamente eliminato quella residua;
- C) NON lasciare acqua nei gorgogliatori non in uso;
- D) Ogni 24 ore svuotare completamente il gorgogliatore, detergerlo con sapone liquido e risciacquarlo perfettamente con acqua distillata sterile prima di riempirlo nuovamente con acqua distillata sterile.

AL TERMINE DELL'UTILIZZO SUL PAZIENTE:

- A) Detergere il serbatoio e il flussimetro utilizzando garze pulite;
- B) Se il serbatoio presentasse incrostazioni calcaree, rimuoverle con aceto;
- C) Sciacquare;
- D) Asciugare con garze pulite;
- E) DISINFETTARE:
 - Riempire il serbatoio con una soluzione a base di Dicloroisocianurato (Bionil 1 cp da 4.6 g in 2 litri di acqua fredda);
 - Avvitare la parte del flussimetro al serbatoio e mantenere un tempo di contatto di 30 minuti;
 - In caso di affezioni causate da Mycobatteri, la soluzione dovrà avere una concentrazione maggiore (1%) pertanto occorrerà usare 4 cp da 4.6 g di Biomunil in 1 litro di acqua;
 - Eliminare successivamente la soluzione disinfettante e sciacquare con acqua distillata sterile;
 - Asciugare e riporre in un sacchetto carta/polietilene al riparo dalla polvere.

	ISTRUZIONE OPERATIVA	IST004	
	OSSIGENOTERAPIA	Rev. 00 del 01-02-16	Pag. 3 di 3

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI:

- A) Non lasciare mai nelle stanze attrezzature per ossigenoterapia non utilizzata;
- B) Conservare ASCIUTTO il materiale.

SET MONOPAZIENTE PER OSSIGENOTERAPIA:

- A) Maschera;
- B) Valvola per la regolazione del flusso;
- C) Tubi di raccordo.

DURANTE LA SOMMINISTRAZIONE DELL'OSSIGENOTERAPIA:

- A) Se sono presenti segni macroscopici di contaminazione, detergere, sciacquare con acqua sterile distillata;
- B) Drenare eventuale condensa in modo che non refluisca verso il paziente;
- C) In caso di Ossigenoterapia per tempi prolungati, sostituire periodicamente tutto il sistema;
- D) Durante la sospensione dell'ossigenoterapia proteggere la maschera da eventuali contaminazioni riponendola in apposito sacchetto.

AL TERMINE DELL'UTILIZZO ELIMINARE IL SET MONOPAZIENTE NEL CONTENITORE PER RIFIUTI SPECIALI.